



REKVISISJON TIL MIKROBIOLOGISKE ANALYSER

Hepatitt C - screening

TIL RID-
ETIKETT
(KUN FOR LAB v/NLSH)

PASIENTENS NAVN: _____

PASIENTENS FØDSELSNUMMER: _____

PRØVEDATO: ___/___/___

REKVIRENT/ANSVARLIG LEGE + LEGEKONTOR :

PRØVETAKNING

- 3 serumglass med gel (gul *eller* rød kork – se bilde)
- La glassene stå rett opp og ned i ½ time
- Sentrifugeres 3000 rpm i 10 min.
- Skal **IKKE** avpipeteres, men sett teip rundt korken

OBS

Prøven må tas mellom mandag og torsdag og ikke før helligdag

ANALYSER

- s-anti HCV
 - s-HBsAg
 - s-Anti HBs
 - s-Anti HBc
 - s-HIV
- Pasienten ønsker IKKE analyse for HIV



eller



La glassene stå
rett opp og ned
i ½ time



Sentrifugeres
3000 rpm i 10
min.

Sendes til
Mikrobiologisk fagområde,
Nordlandssykehuset HF
Prinsens gate

Informasjon til labpersonell (NLSH, Bodø)

Dette er en prøve tilknyttet eliminasjonsprogrammet for Hepatitt-C, derfor 3x prøveglass:
ANALYTIX – registrere prøven under profil «HepC- Eliminasjon screening» kortkode **HEPC**

Glass 1) Benyttes til analysene i profilen «HepC- Eliminasjon screening» kortkode «HEPC».

De to gjenværende glass avpipeteres og fryses (Se **PR47253**)

Dersom reaktiv anti-HCV

→ Innhold fra Glass 2) hentes fra fryser og settes til HCV-RNA-kvantitering (HCV-PCR).
Se **PR47253**.

Dersom HCV-RNA-kvantitering >2000 x10³ IU/L.

→ Innhold fra Glass 3) hentes fra fryser og sendes frosset til HCV-genotyping
v/UNN. Se **PR40233**